


***RUBY HD 4.3* インチ**

拡大読書器 ルビーHD4.3 インチ
簡単操作ガイド


モニター側正面

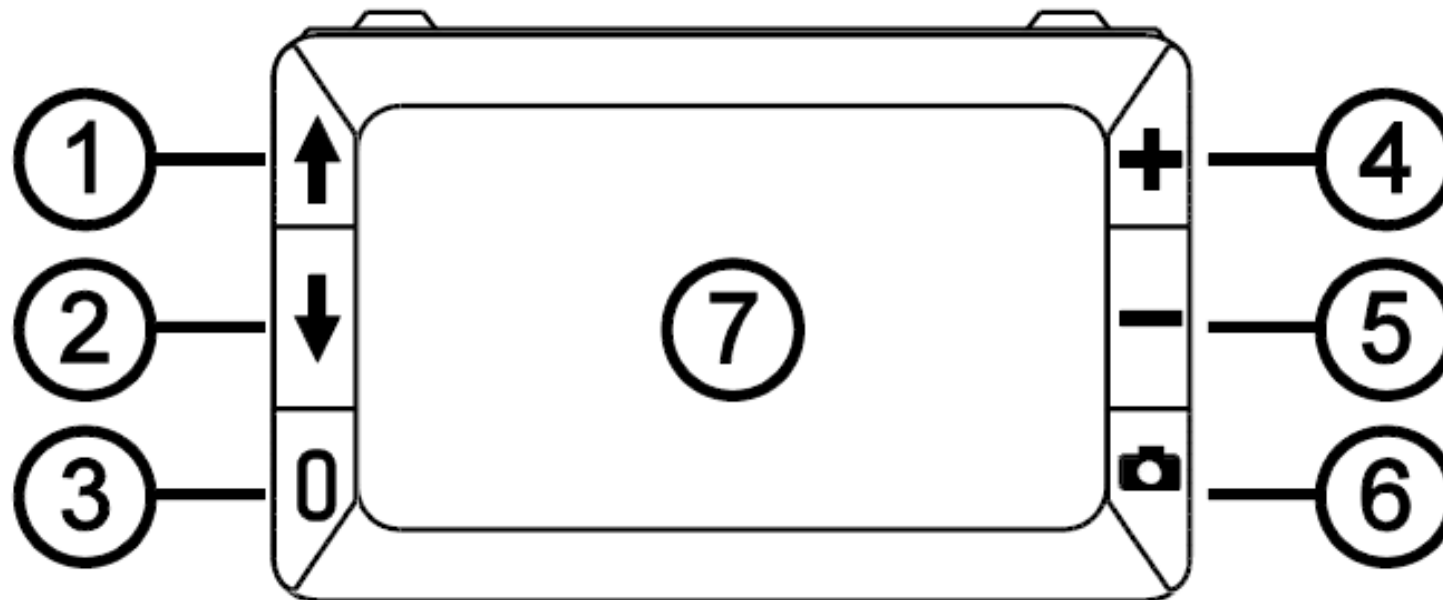

1. カラーモード上スクロール(青)
2. カラーモード下スクロール(青)
3. 電源(緑／黄)


4. 拡大率を上げる(黄)
5. 拡大率を下げる(黄)
6. 静止画撮影(赤)
7. LCDモニター

側面

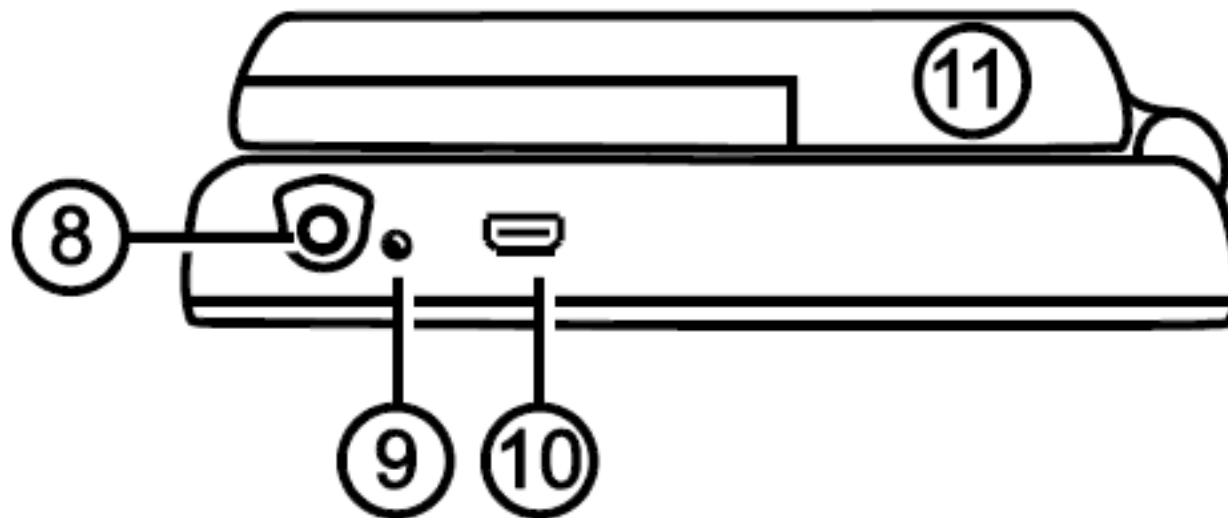

- 8. 充電器接続ポート
- 9. バッテリー状態表示ランプ
- 10. USBポート
- 11. 収納時の持ち手

裏面

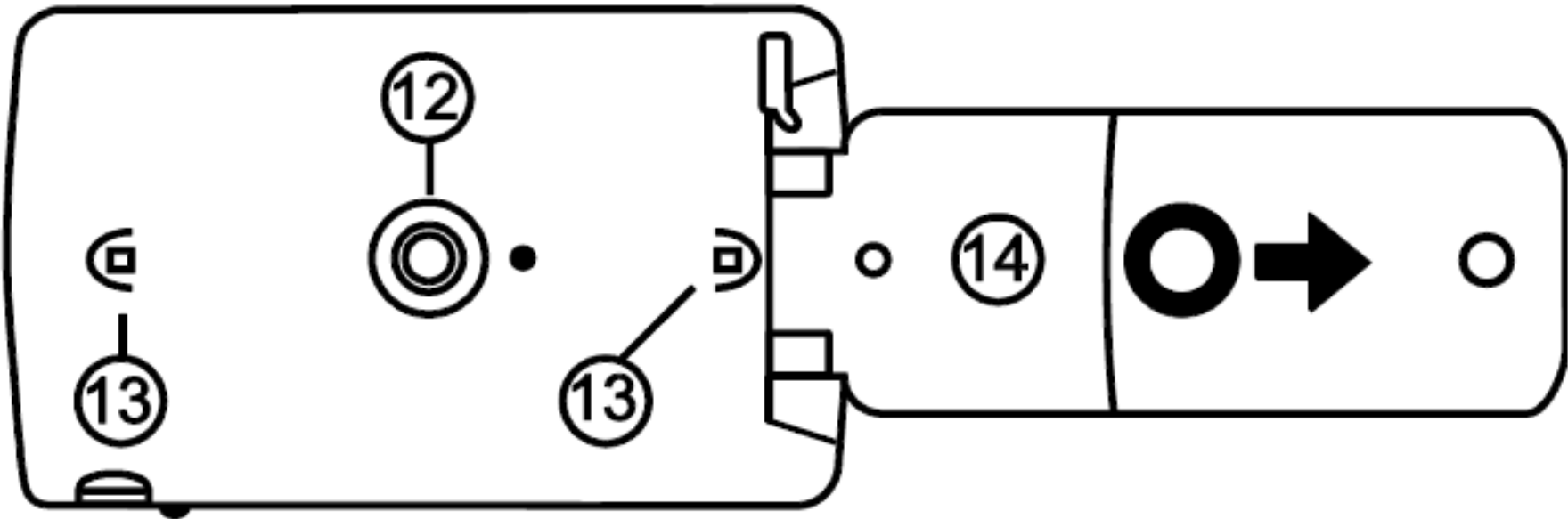

12. HD カメラ

13. LED ライト

14. 持ち手と電池カバー(矢印方向にスライドすると外れます)

ボタンと機能



電源ボタン（緑／黄）：電源のオン／オフ



拡大ボタン（黄）：表示した画像の拡大率を変更します。ボタンを押し続ける事でズームインまたはズームアウトします。静止画像を表示している場合も拡大率の変更は可能です。



カラーモードボタン（青）：ボタンを押すたびにカラーモードを切り替えることができます。基本の設定は5種類のカラーモードがあり、設定することでさらに15種類のカラーモードを利用できます。




静止画撮影ボタン（赤）：ボタンを押すと、その時に表示されている画面の映像を静止画撮影できます。再度ボタンを押すと通常の状態に戻ります。

持ち手

- 持ち手を開くとループのように持つことができます。缶や瓶などのラベルやパッケージなどを詳しく見たい場合に使います。
- 持ち手を閉じた場合は、新聞など紙の上に置いて使用します。


以下の図をご参照ください。

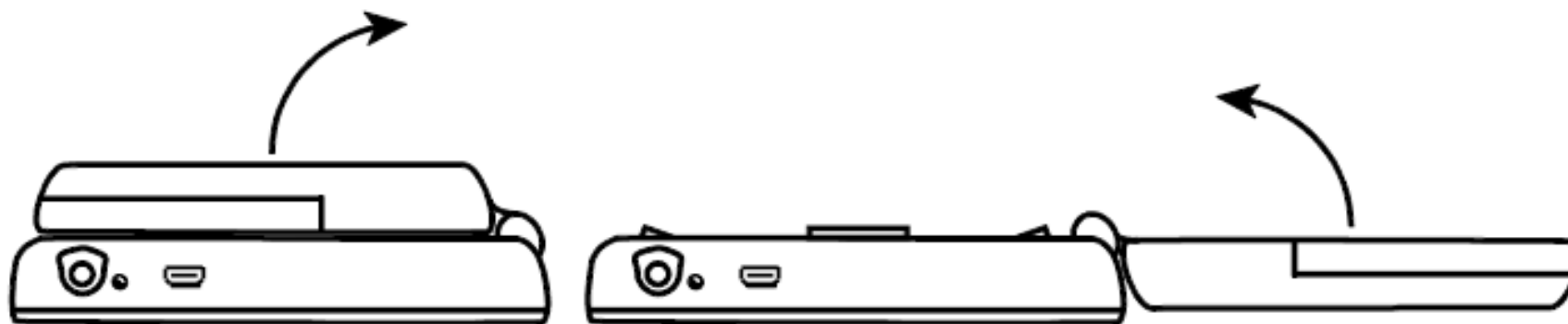

充電

充電には付属の AC アダプタをご利用ください。USB ケーブルからの充電は対応しておりません。

1. AC アダプタのプラグを本体の充電器接続ポートに接続し、アダプタを電源コンセントに接続してください。

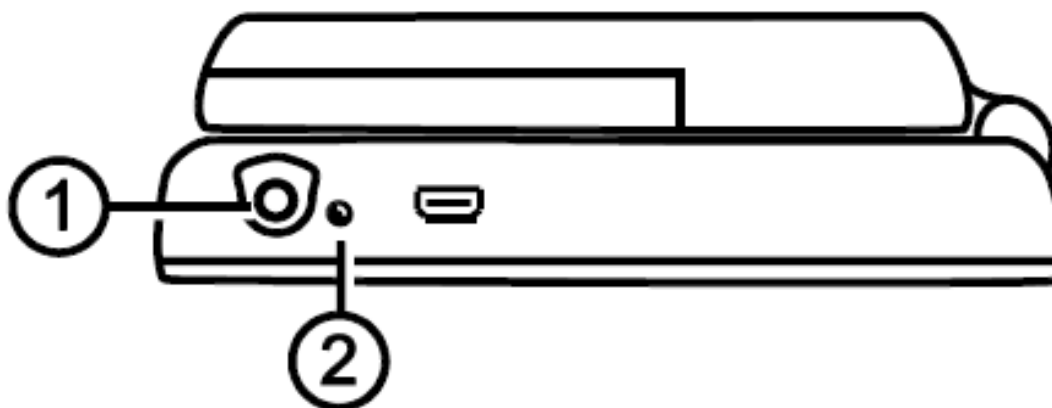

- ① 充電器接続ポート
- ② バッテリー状態表示ランプ

2. 充電中の状態になるとバッテリー状態表示ランプが緑色に点滅します。
3. 緑色の点滅が終わり、緑色に点灯すると充電終了です。ACアダプタを外してください。アダプタを外すとバッテリー状態表示ランプは消灯します。
4. ルビーHD4.3インチは2時間程度使用するとバッテリー残量がなくなります。バッテリー残量が少なくなるとバッテリー状態表示ランプが赤く点灯します。再度充電してご利用ください。

<電池と充電に関する注意事項>

- アルカリ乾電池を使用中は絶対に充電を行わないでください。
- ニッケル水素充電電池（Ni-MH）とアルカリ乾電池は絶対に混ぜて使用しないでください。
- 同じニッケル水素充電電池（Ni-MH）であってもメーカーや容量が異なるものを絶対に混ぜて使用しないでください。
- バッテリーを交換する場合は必ず4本全て同じ製品の電池と交換してください。
- 使用済みのニッケル水素充電電池（Ni-MH）と新品を絶対に混ぜて使用しないでください。

これらが守られない場合、バッテリーの故障や液漏れ、事故等の原因となる可能性があります。

使用するニッケル水素充電電池（Ni-MH）は容量1000mAhの物が推奨です。容量の少ないタイプをご利用になると連続使用時間が短くなります。

バッテリーランプについて

緑点灯→充電完了・ACアダプタ接続中

緑点滅→充電中・ACアダプタ接続中

赤点滅→要充電（バッテリー残量低）

赤点灯→エラー（ACアダプタを抜き、数分待ってからもう一度接続してください。）

節電機能

ルビーHD4.3 インチは 30 分間全く操作しない状態が続くと自動的に電源が OFF になり電池の消耗を抑えます。

※さらに詳しい使い方は同封の取扱説明書をご参照ください。