

ONYX Deskset HD

モニター一体型 高画質 3 方向カメラ拡大読書器

オニキスデスクセット HD22

設置・操作簡単ガイド

目次


内容物一覧	3
オニクスデスクセット HD の外観（裏面）	4
オニクスデスクセット HD の設置.....	5
本体の持ち運び	9
オニクスカメラのレンズ.....	10
リモコンガイド	13
機能ランプ.....	14
電源ボタン（緑色）	14
ファインドボタン（赤色）	15

フリップボタン（水色）	16
カラーモードボタン（青色）	17
明るさ調節ボタン（黄色）	18
ズームボタン（黒色）	19
フリーズボタン（赤色）	20
フォーカスロックボタン（オレンジ色）	21
行マーカーボタン（白色と黒色）	23
マスク／シェードボタン（黒色と白色）	24
幅（WIDTH）ボタン（白色）	25
上下（UP/DOWN）ボタン（黒色）	25
機能ボタン（黒色）	26
商品に関するお問い合わせ先	27

内容物一覧



- ・オニキスデスクセット HD 本体
- ・電源コード
- ・リモコン
- ・リモコンガイド
- ・設置手順・簡単操作ガイド
- ・取扱説明書
- ・保証書
- ・ユーザー登録カード

オニキスデスクセット HD の外観（裏面）


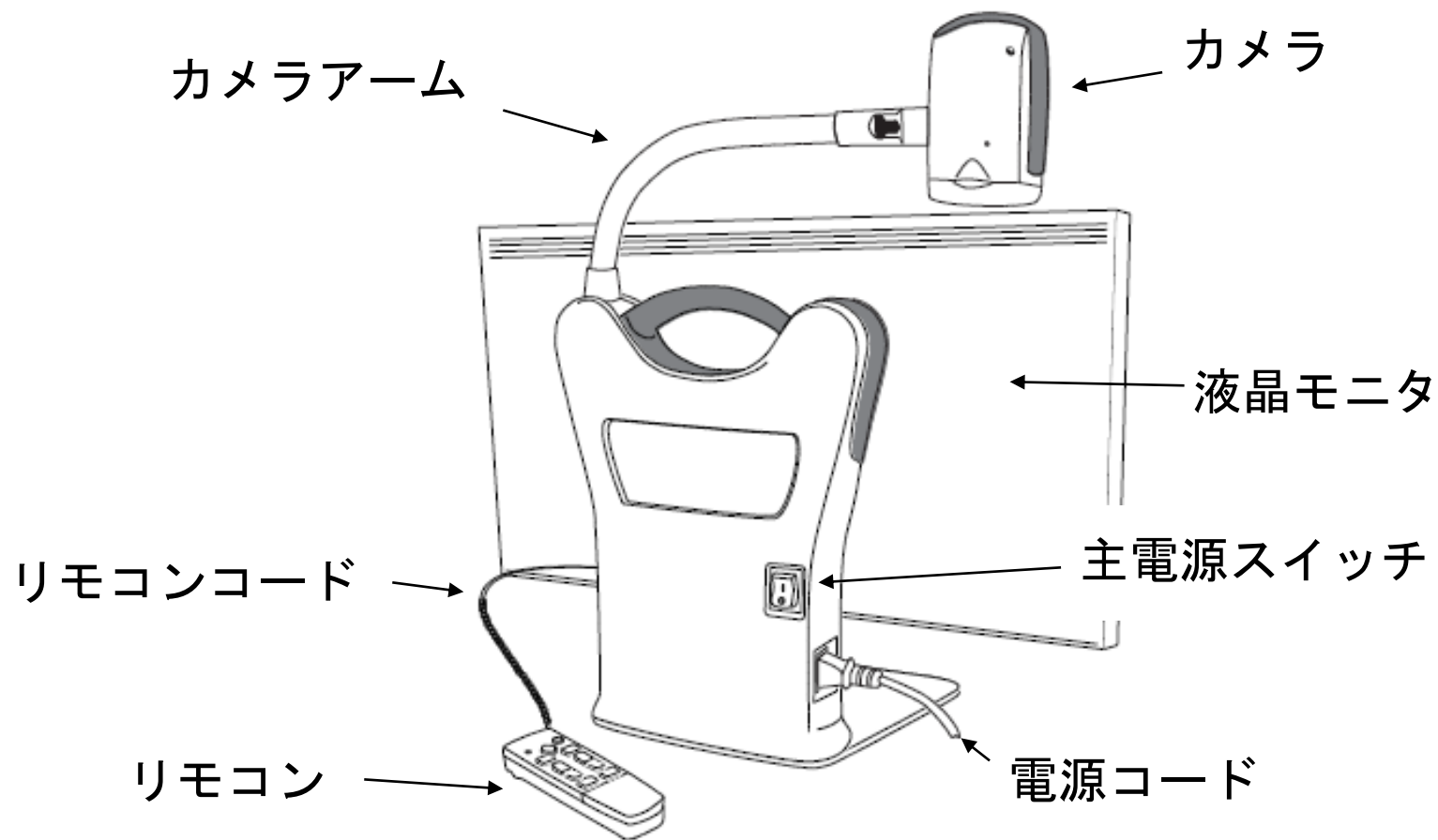


オニクスデスクセット HD の設置

1. ①の持ち手を持って本体を移動してください。
2. 設置したい場所に置いたら、②のカメラアームを上に戻りカメラを使用位置に持ち上げてください。

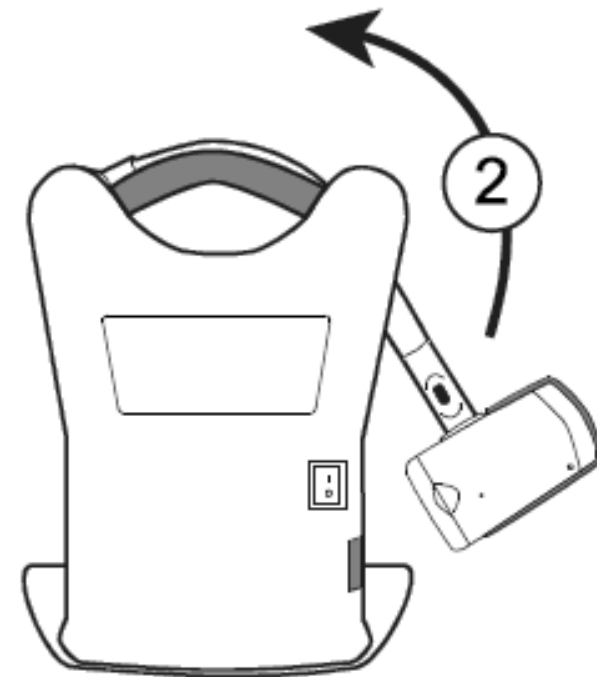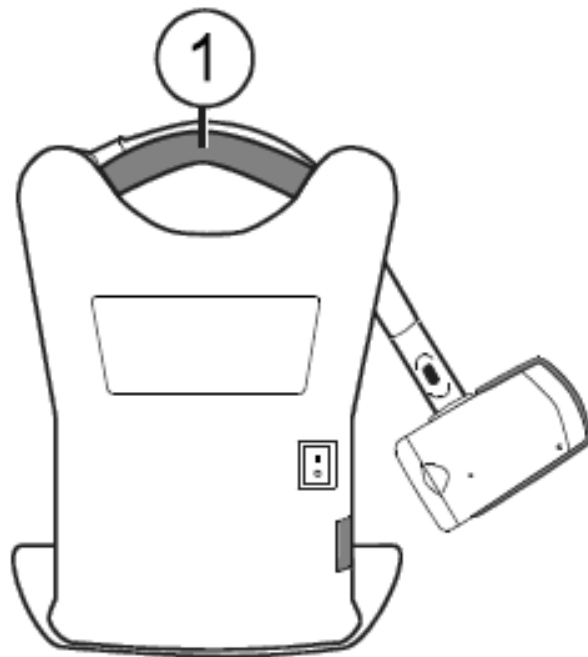

3. コンセントにつないだ電源ケーブルを③に接続してください
4. 主電源を入れてください。

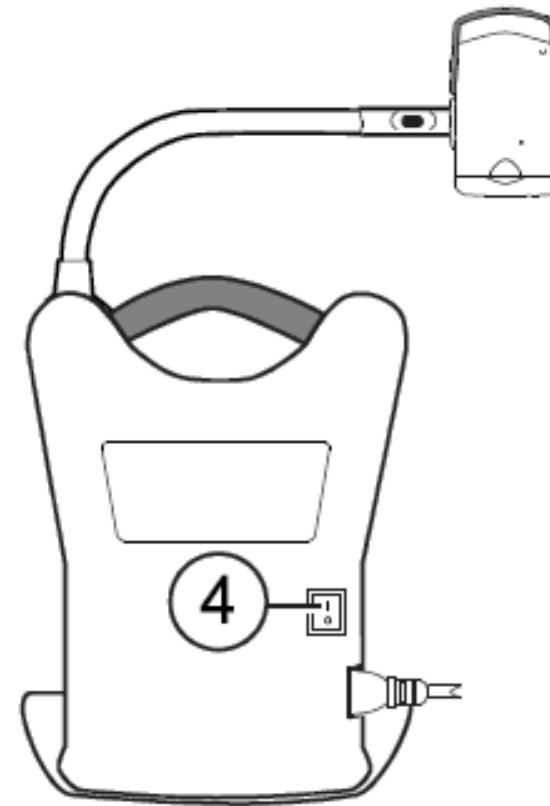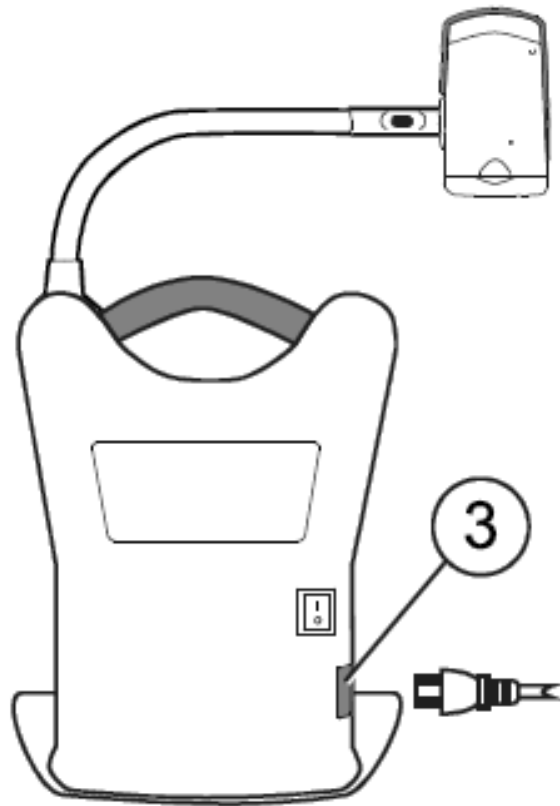

5. リモコンの線を本体に接続してください。




ケーブルがしっかりと接続されないと、誤動作を起こす事があります。誤動作が起きてしまった場合は、背面の主電源をオフにした状態でリモコンのケーブルを外して繋ぎ直してください。再度主電源をオンにすれば正常に動作します。

オニキス使用中にリモコンケーブルが引っ張られることで、同様の症状を起こす場合もあります。その際も上記の操作で復旧してください。


本体の持ち運び

本体を持ち上げる際は必ず持ち運び用の持ち手を使用してください。カメラやカメラアームを持ってしまうと故障の原因となる場合があります。

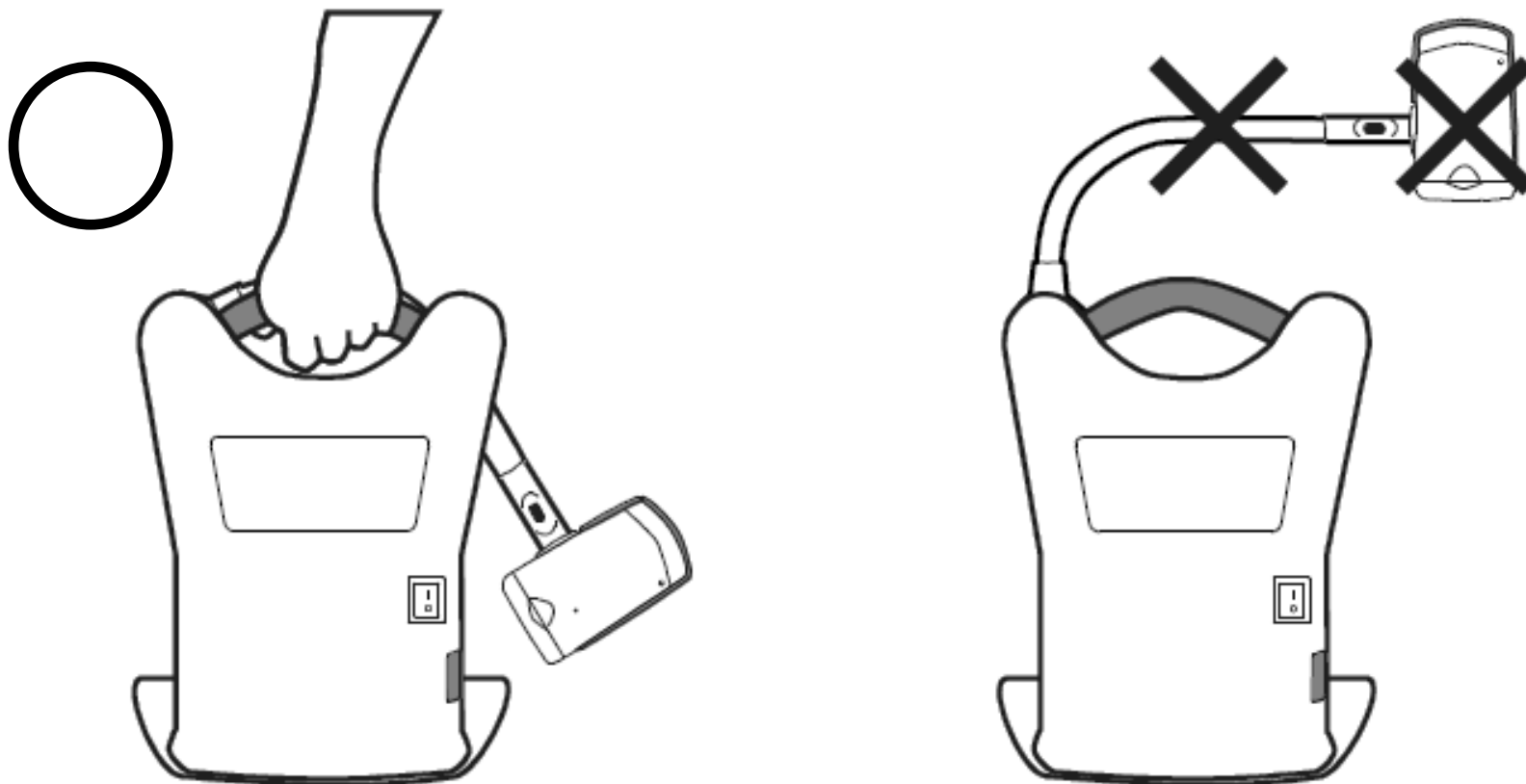


オニキスカメラのレンズ


遠くの対象物を拡大して見たい場合はオニキスカメラのレンズを上を開いて使用します。

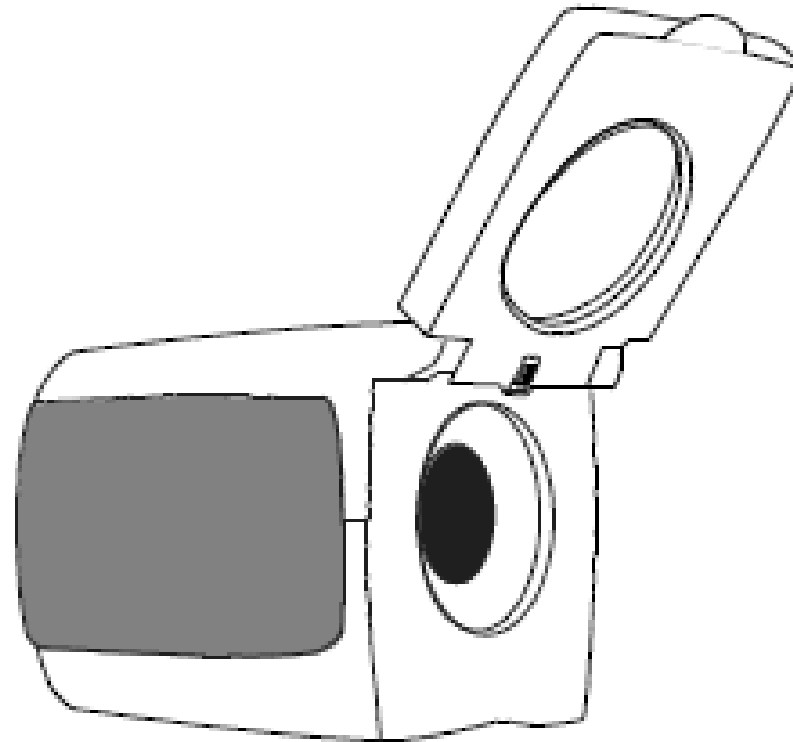

近くの対象物を拡大して見たい場合や、自分側に向けて使用したい場合はオニキスカメラのレンズを閉じて使用します。

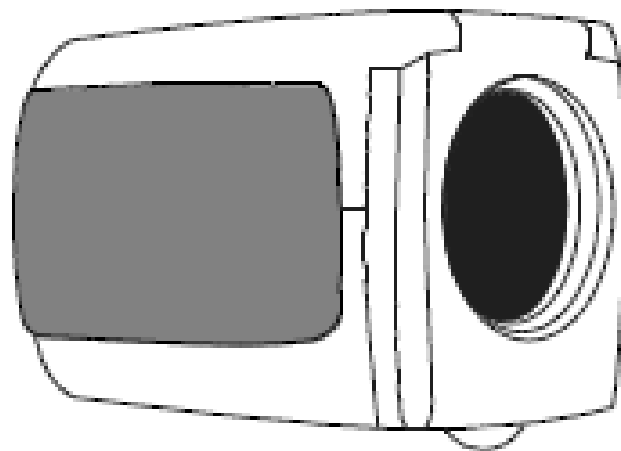


カメラを下に向けて手元を拡大して見たい場合はオニキスカメラのレンズを閉じて使用します。

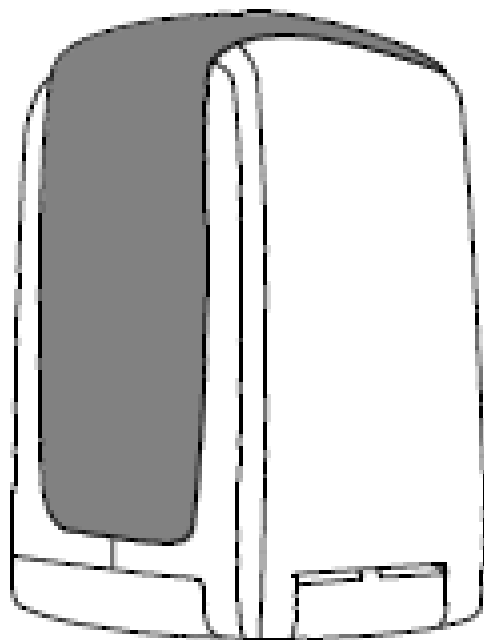

リモコンガイド

機能ランプ

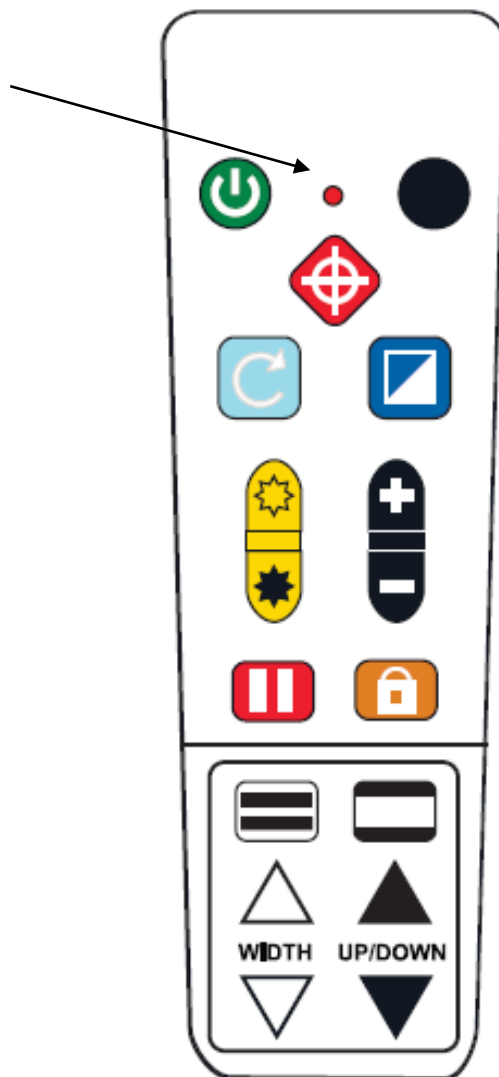

リモコン下部を下方方向にスライドさせるとカバーを外すことができます。カバーを外すとマスキング機能と行マーカ機能 operates ボタンがあります。

機能ランプ

リモコンのボタンを押す度にこのランプが赤く点灯します。リモコンの上中央にあります。



電源ボタン（緑色）

緑色の電源ボタンで電源を ON にします。電源を OFF するには電源ボタンを長押しして下さい。

電源が ON になるとオニキスカメラの赤いランプが点灯します。

電源ボタン（緑）はリモコンの左上にあります。



ファインドボタン（赤色）

ファインドボタンを押すと、十字カーソルが画面に表示されます。

十字の中心を拡大して見たい対象に合わせてください。
この状態でズームを行うと対象物を見失わずに拡大率を変更する事ができます。

拡大率を変更した後で、ファインドボタンを長押しするとズームボタンを押す前の状態に戻り十字カーソルが消えます。



フリップボタン（水色）

フリップボタンを押すごとに表示されている画像が以下のように回転します。



通常の状態

1 回押した
状態

2 回押した
状態

3 回押した
状態

4 回押した状態
(通常の状態に戻る)



カラーモードボタン（青色）

カラーモードボタンを押すと、以下のカラーモードが切り替わります。

■フルカラー

■ハイコントラストフルカラー

■白背景・黒文字

■黒背景・白文字

■青背景・黄文字

■黒背景・黄文字




明るさ調節ボタン（黄色）


上部の明るさ調節ボタン  を押すと画面が明るくなります。


下部の明るさ調節ボタン  を押すと画面が暗くなります。

明るさ調節ボタンはリモコン中央の左側にあります。

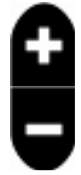

ズームボタン（黒色）

黒色の＋ボタン  を押すと、表示している画像の拡大率が上がります。

黒色の－ボタン  を押すと、表示している画像の拡大率が下がります。

ズームボタンはリモコン中央の右側にあります

フリーズボタン（赤色）

赤色のフリーズボタンを 1 回押すと、現在の画面が静止画として表示され、画面に FREEZE の文字が表示されます。再度フリーズボタンを押すと静止画が終了して通常の画面に切替わります。

静止画の状態では拡大倍率や明るさを変更しても通常の画面に切替わります。

フリーズボタンはリモコンの左下にあります。



フォーカスロックボタン（オレンジ色）

フォーカスロックボタンを押すと、オートフォーカスが OFF になります。オートフォーカスが ON になっていると、オニキスは一番近い対象物に自動で焦点を合わせます。オートフォーカスを OFF にすると、画面に LOCK の文字が表示され、カメラは焦点を固定する設定になります。手元で書き物をしたり、作業をしたりする場合、オニキスが手の動きに併せてオートフォーカスしないので作業がしやすくなります。

手元を拡大する場合以外はオートフォーカス機能を ON

にしておくことをお勧めします。

画面に LOCK の文字が表示されている状態でもう一度フォーカスロックボタンを押すとオートフォーカスがオンになり LOCK の文字が消えます。

フォーカスロックボタンはリモコンの右下にあります。



行マーカークボタン（白色と黒色）

行マーカークボタンを押すと画面に 2 本の水平線が表示されます。

2 本の線を読みたい文章に合わせることでどの行を読んでいるかわかりやすくします。

白い WIDTH ボタンの上下を押すと 2 本の線の間隔を変更できます。

黒い UP/DOWN ボタンの上下を押すと 2 本の線の位置を変更できます。

行マーカークボタンはリモコン下部のスライドカバーを外すと使用できます。



マスク／シェードボタン（黒色と白色）

マスク／シェードボタンを押すと画面の上部と下部を黒く（シェードの場合薄い灰色）隠して、画面の一部だけを表示するように設定できます。

白い WIDTH ボタンの上下を押すと下部のマスクの高さを変更してマスクされない画面の幅を調節できます。

黒い UP/DOWN ボタンの上下を押すとマスクの位置を変更できます。

マスクボタンはリモコン下部のスライドカバーを外すと使用できます。



幅 (WIDTH) ボタン (白色)

ラインやマスクの幅を調節することができます。
幅 (WIDTH) ボタンはリモコン下部のスライドカバーを外すと使用できます。



上下 (UP/DOWN) ボタン (黒色)

ラインやマスクの位置を上下に調節することができます。
上下 (UP/DOWN) ボタンはリモコン下部のスライドカバーを外すと使用できます。

● 機能ボタン（黒色）

単独では使用しません。

電源ボタンと同時に押すことでカラーモードの設定を行う事ができます。

さらに詳しい使い方は取扱説明書をご確認ください。

商品に関するお問い合わせ先

株式会社インサイト

住所：〒981-3212

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘 3-28-1

TEL：022-342-6801

FAX：022-342-6802

お電話受付時間：10:00～18:00

（土・日・祝日・年末年始は除く）