
コンパクト8 簡単操作マニュアル

ご使用前に…

コンパクト8を使用する前に、付属の AC アダプターと USB ケーブルを使用して充電を行ってください。

本体の外観(本体背面)

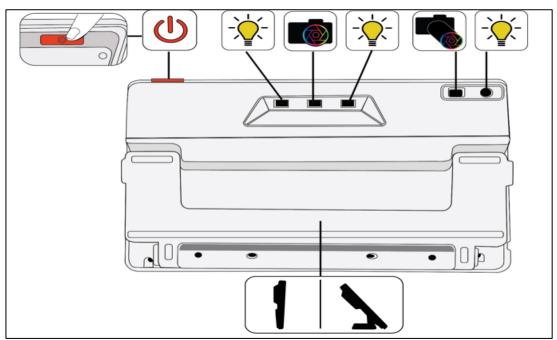



…電源ボタン

4 秒間長押しすると電源が入ります。



…スタンドモード用カメラ

スタンドを開くと、このカメラに切り替わります。



…手持ちモード用カメラ

スタンドを閉じると、このカメラに切り替わります。




…カメラ使用時のライト



操作方法

電源起動後、画面を1度タップすると以下図のようにメニューが表示されます。

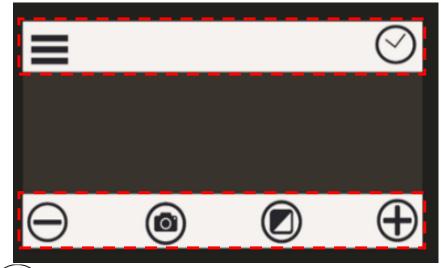



…ズームアウト



…キャプチャ

画面に表示した画像を撮影します。



…カラーモード



…ズームイン

以下の2つは詳細モードのみで使用できます。




※メインメニューの内容については、同梱の取り扱い説明書をご確認ください。




...時計

簡単モードと詳細モードの切り替え方法

1. カラーモードボタンを 5 秒間押し続けます。

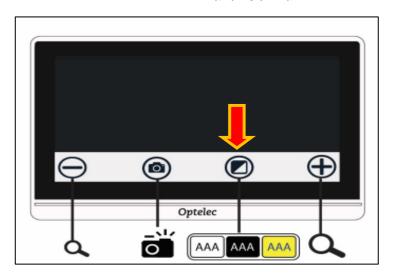

2. モードメニューが表示されるので、「簡単」または「詳細」をタップします。簡単モードでは、下のボタンバーのみが表示されます。詳細モードでは上にもボタンバーが表示されます。

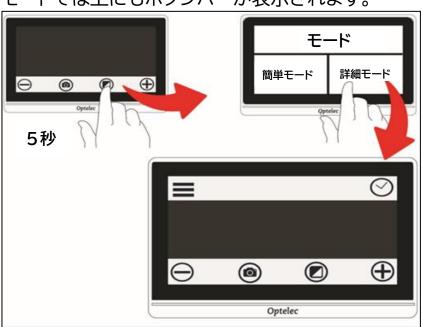

簡単モード:下のメニューバーのみが表示されます。 詳細モード:上下にメニューバーが表示され、システム設定等が 有効になります。

